



GUÍA RÁPIDA

DE FUNCIONAMIENTO

SaltMED™Inc

206 Birmingham Drive, Cardiff by the Sea, CA 92007
(760) 334.5267 • info@thesaltfacial.com • www.saltmed.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

REJUVENECIMIENTO CON SAL MARINA	3
ULTRASONIDO ESTÉTICO	4
FOTOTERAPIA LED	5 - 7
MANTENIMIENTO DEL DESHUMIDIFICADOR RECARGABLE	8
MANTENIMIENTO DEL BRAZO ARTICULADO Y DE LOS PANELES LED	9
MANTENIMIENTO DIARIO	10
MANTENIMIENTO SEMANAL	11
SERVICIO Y ASISTENCIA	12

CÓMO UTILIZAR EL CÓDIGO QR

¡Bienvenido! Esta guía utiliza la tecnología de los códigos QR. En algunas tarjetas, verá un código que puede escanearse con la cámara de su smartphone y que ofrece un vídeo en línea o un enlace a más información sobre la tarjeta. En algunos teléfonos antiguos tal vez sea necesario instalar una aplicación de código QR.

ENFÓQUELO

Enfoque con su teléfono el código QR

ESCANÉELO

Tome una foto del código QR 

¡DISFRÚTELO!

Una vez que su teléfono reciba el código QR, relájese y disfrute de los resultados.

PASO 1: REJUVENECIMIENTO CON SAL MARINA

1. ENCIENDA EL MÓDULO DE SAL MARINA

Presione el interruptor negro de *On/Off* (encendido/apagado) que se ubica en el lado izquierdo del Panel de control del rejuvenecimiento con sal marina (*Sea Salt Resurfacing control panel*) en "ON" (ENCENDIDO) (I).


2. SELECCIONE EL NIVEL DE INTENSIDAD

Para ajustar el nivel de intensidad: pulse los botones redondos "+/-" situados a cada lado de la ventana de intensidad. Los niveles de intensidad van de 3 (el más bajo) a 10 (el más alto).

El sistema volverá de forma automática al último nivel de intensidad utilizado.

3. ACTIVE EL FLUJO DE SAL

Presione el interruptor negro en el lado derecho del Panel de control del rejuvenecimiento con sal marina, a la posición "ON" (ENCENDIDO) (I). La luz verde se enciende cuando el flujo de sal está en "ON" (ENCENDIDO).

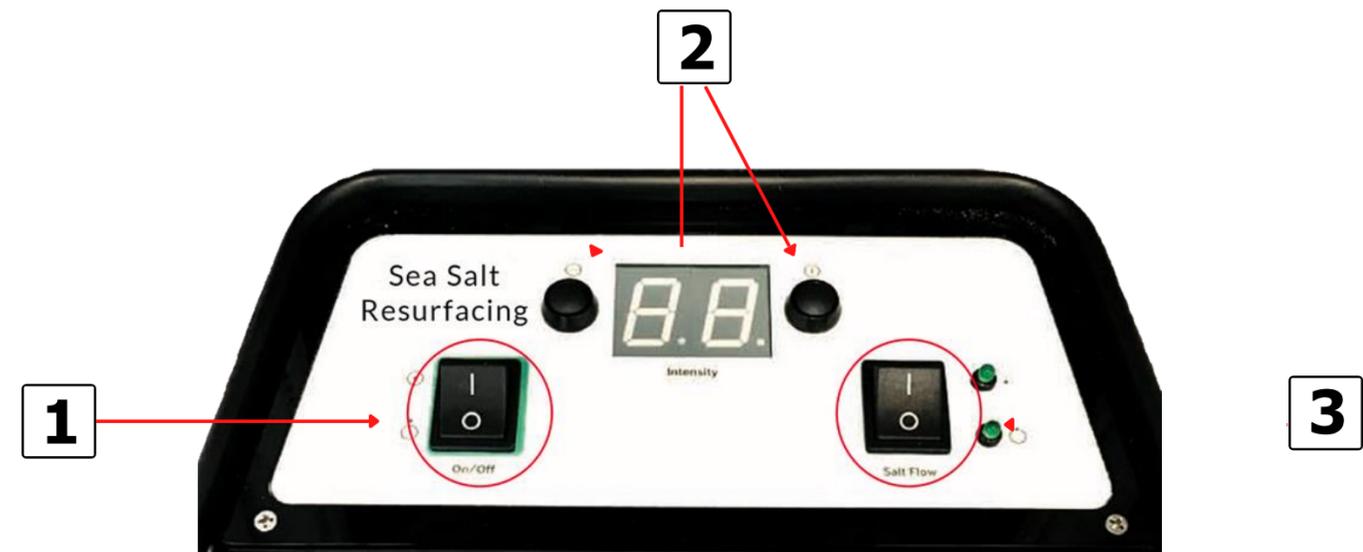

ZONA DE TRATAMIENTO	NIVEL DE INTENSIDAD*	NÚMERO DE PASADAS
CARA, CUELLO Y PECHO	3-5	2-3
PERI-ORBITAL	3	1
BRAZOS Y MANOS	4-6	2-3
PIERNAS Y PARTE SUPERIOR DE LOS PIES	4-6	3
ESPALDA Y HOMBROS	4-6	3-4
ABDOMEN	4-6	3-4



PASO 2: ULTRASONIDO ESTÉTICO

1. **APLIQUE** de 3 a 4 bombeos de SaltFacial DermMasque o su tópico favorito.
2. **APLIQUE** una capa fina de Gel deslizante SaltFacial (sin frotar).
3. **RETIRE** el ultrasonido estético de su soporte y quite la tapa azul.
4. **ENCIENDA** el módulo del ultrasonido estético pulsando el botón POWER (ENCENDIDO), hasta que se ilumine la pantalla de terapia.

NO UTILICE LAS UÑAS PARA PULSAR LOS BOTONES, YA QUE PUEDEN DAÑARSE DE FORMA PERMANENTE

5. **CONFIRME** los ajustes del tratamiento: ciclo de trabajo del 50 % / 8:00 minutos de tratamiento / 1.85 W/cm²
 6. **COLOQUE** el cabezal de ultrasonido en la zona de tratamiento y muévalo con movimientos circulares lentos hasta que el temporizador llegue a 0:00 y el tratamiento haya finalizado.

Para interrumpir el tratamiento, retire el cabezal de ultrasonido de la zona de tratamiento. El temporizador del tratamiento también se detiene hasta que se restablezca el contacto.

Si el contacto no se ha restablecido en 3 minutos, la unidad se apagará de forma automática (reiniciando el temporizador de tratamiento).
 7. **ELIMINE** el exceso de gel de la zona de tratamiento con una gasa suave y seca o con un paño suave.
- LIMPIEZA RUTINARIA:** Limpie el cabezal del transductor después de utilizarlo y antes de colocarle la tapa protectora.

NOTA: Se recomienda el uso de un protector estéril en caso de que la sangre entre en contacto con el transductor.



CONFIRMACIÓN VISUAL Y SONORA DEL CONTACTO

Cuando esté en pleno contacto, la luz azul de la parte superior del Panel de control de ultrasonido estético se iluminará, el temporizador del tratamiento realizará una cuenta regresiva automática desde las 8:00, y habrá una señal sonora cada pocos segundos.

Si se pierde el contacto durante el tratamiento, aplique más gel deslizante y vuelva a colocar el cabezal de ultrasonido sobre la zona de tratamiento.



PASO 3: FOTOTERAPIA LED

1. ASEGÚRESE DE COLOCAR LAS GAFAS PROTECTORAS AL PACIENTE

2. PANELES DE POSICIÓN LED

Coloque los paneles LED a 4-6" de la zona de tratamiento.

3. ENCIENDA EL MÓDULO DE FOTOTERAPIA LED

Para encender el aparato, pulse el botón de encendido situado en el extremo izquierdo del panel de control.

4. SELECCIONE EL MODO DE TRATAMIENTO


Pulse *Mode* (Modo) para seleccionar el modo de tratamiento deseado.

El modo de tratamiento se ilumina cuando se selecciona y el temporizador se ajusta de forma automática.

5. INICIE EL TRATAMIENTO

Mantenga pulsado *On/Pause* (Encendido/Pausa), hasta que se ilumine la luz blanca en el extremo derecho del panel de control de fototerapia LED, y suéltelo inmediatamente.

Para pausar el tratamiento, pulse *On/Pause* (Encendido/Pausa). Pulse de nuevo *On/Pause* (Encendido/Pausa) para reanudar el tratamiento.

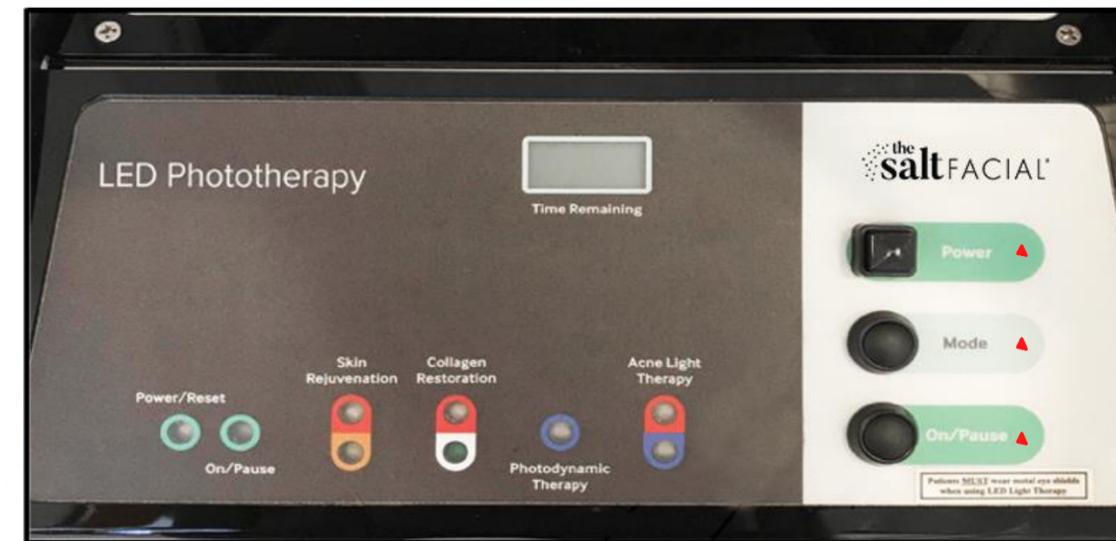


3

4

5



FOTOTERAPIA LED: TABLA DE LONGITUDES DE ONDA

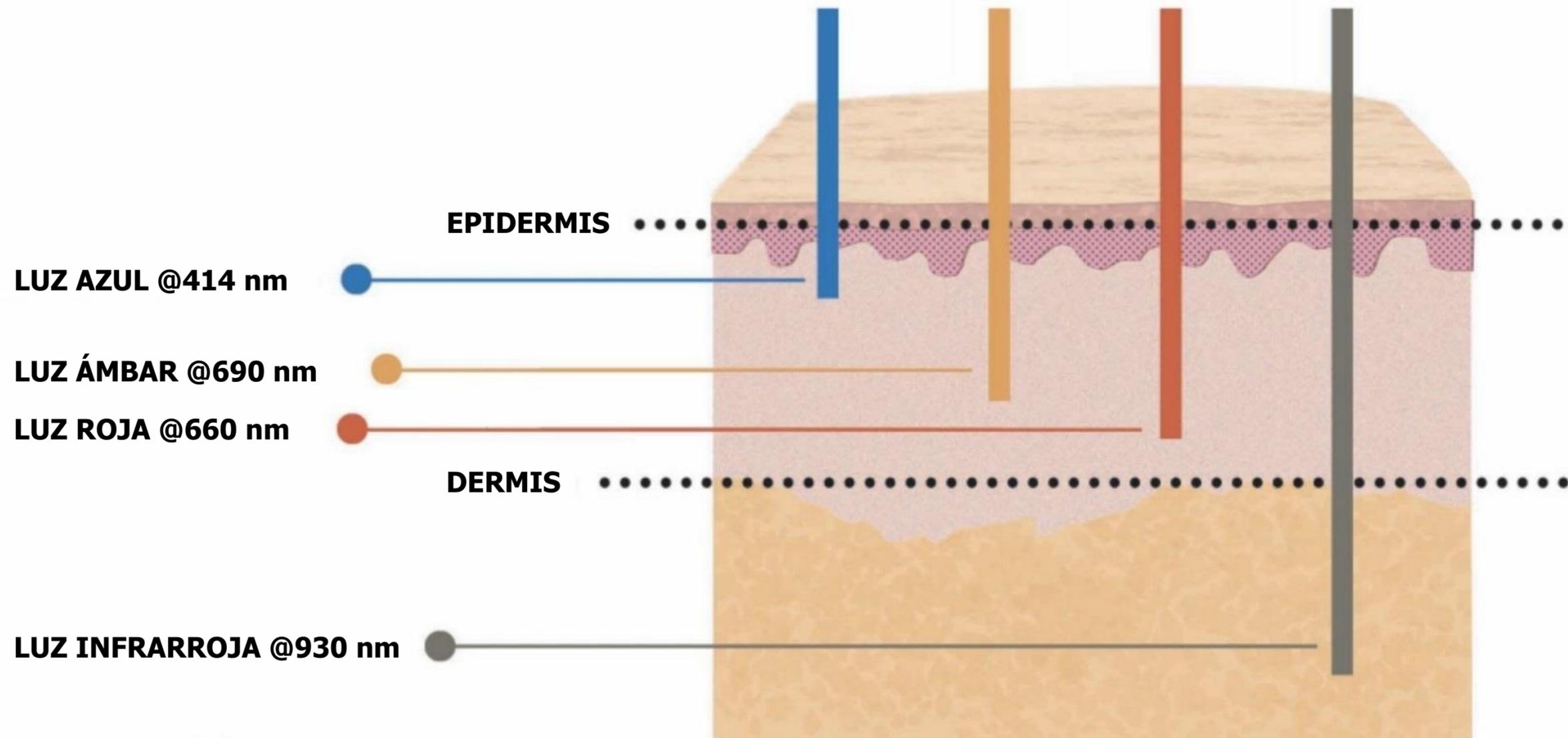

FOTOTERAPIA LED: MODOS DE TRATAMIENTO

TERAPIA DE LUZ PARA EL ACNÉ

LONGITUDES DE ONDA: **AZUL** + **ROJO**

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 20 MINUTOS

USO: Como etapa final de la Terapia de renovación cutánea de SaltFacial, o inmediatamente después del procedimiento (láser, rodillo con miro-agujas o *microneedling*, peeling químico, etc.) para reducir el enrojecimiento y la inflamación, estimular la renovación celular, aumentar la circulación y promover la curación.

TIPOS DE PIEL: Todos***

TERAPIA FOTODINÁMICA

LONGITUDES DE ONDA: **AZUL**

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 9 MINUTOS

USO. Como etapa final de la Terapia de renovación cutánea de SaltFacial, inmediatamente antes o después del procedimiento (láser, rodillo con miro-agujas o *microneedling*, peeling químico, etc.) para destruir las bacterias superficiales y subsuperficiales.

TIPOS DE PIEL: Todo

RESTAURACIÓN DEL COLÁGENO

LONG. DE ONDA: **ROJO** + INFRARROJO CERCANO

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 20 MINUTOS

USO: Como etapa final de la Terapia de renovación cutánea de SaltFacial, o inmediatamente después del procedimiento (láser, rodillo con miro-agujas o *microneedling*, peeling químico, etc.) para reducir el enrojecimiento y la inflamación, estimular la renovación celular, aumentar la circulación y promover la curación.

TIPOS DE PIEL: Todos*

***SE ACONSEJA SU USO EN
PACIENTES CON
ROSÁCEA ACTIVA**

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

LONGITUDES DE ONDA: **ROJO** + **ÁMBAR**

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 20 MINUTOS

USO: Como etapa final de la Terapia de renovación cutánea de SaltFacial, o inmediatamente después del procedimiento (láser, rodillo con miro-agujas o *microneedling*, peeling químico, etc.) para reducir el enrojecimiento y la inflamación, estimular la renovación celular y promover la curación.


TIPOS DE PIEL: Todo



MANTENIMIENTO DEL DESHUMIDIFICADOR RECARGABLE



VERDE = REEMPLAZAR Y RECARGAR
(Enchufe durante 12 horas para cargar)

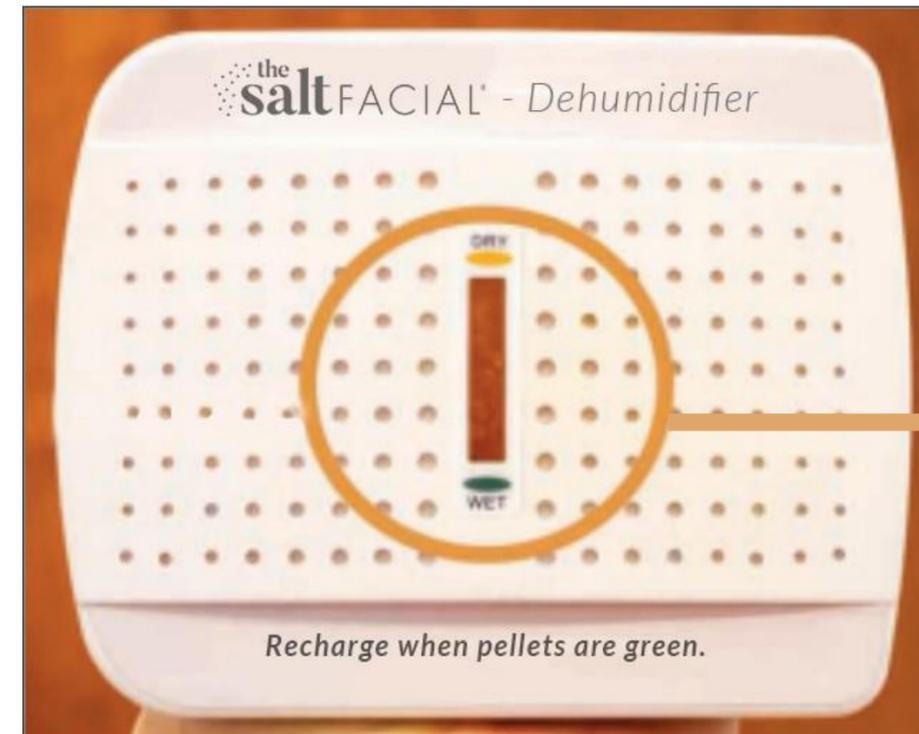

NARANJA = SECO Y LISTO PARA USAR


Guarde el deshumidificador extra completamente cargado en una bolsa de plástico en un lugar seco.

NO DEJE NUNCA EL DESHUMIDIFICADOR CONECTADO DURANTE MÁS DE 15 HORAS



MANTENIMIENTO DEL BRAZO ARTICULADO Y DE LOS PANELES LED

- Es importante mover el brazo articulado con cuidado y NO forzarlo.
- Apoye siempre el brazo articulado entre la **ARTICULACIÓN 1** y la **2** cuando afloje y apriete el conjunto de LED.
- Afloje siempre la **ARTICULACIÓN 2** (codo medio) antes de bajar el brazo del LED.
- El pistón puede dañarse si no se afloja; tal caso puede invalidar la garantía.
- No gire el cable del LED alrededor de la **ARTICULACIÓN 1** o **3**.

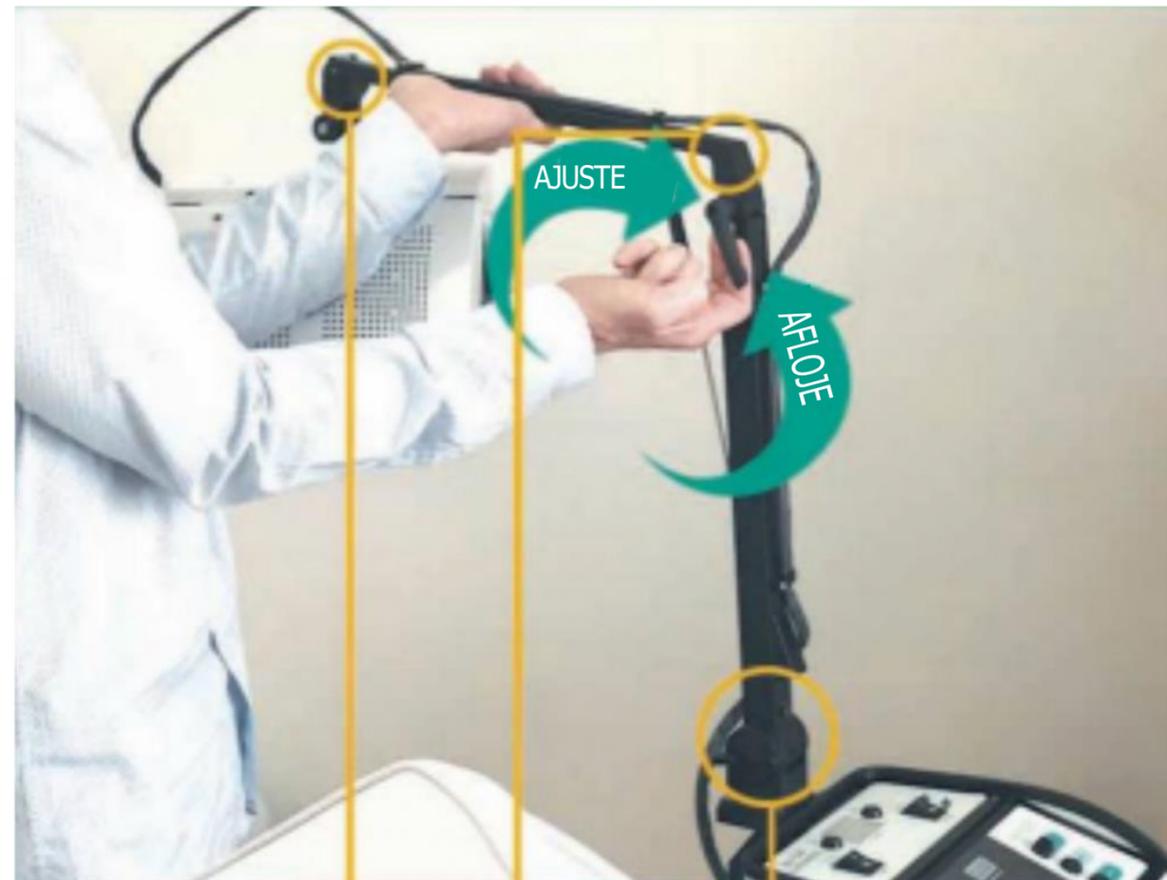

ADVERTENCIA, PELIGRO DE CAÍDA:

Si se afloja, el cabezal del LED puede causar lesiones o daños en el sistema.



MANTENIMIENTO DIARIO

1. **HIGIENICE** todos los accesorios utilizados (pieza de mano, cabezal de ultrasonido, gafas LED)

2. SISTEMA DE PURGA

ABRA la puerta de la cámara de sal en el panel frontal y retire el recipiente de sal del soporte; gire el recipiente de manera que la tapa negra de la sal quede hacia arriba. Mantenga el recipiente más bajo que el nivel del tubo visible dentro de la cámara.

ACTIVE el flujo de sal y el sistema para luego ajustar al nivel 10.

MANTENGA el pulgar sobre la abertura de la pieza de mano hasta que el sistema comience a hacer "clic" o se eliminen todas las marcas de sal visibles de la línea.

DESACTIVE el flujo de sal y el sistema.


SUSTITUYA el recipiente de sal en la cuna dándole la vuelta y colocándolo suavemente en su sitio. Una parte de la sal volverá a caer en la tubería.

CIERRE la puerta de la cámara de sal y el proceso habrá terminado.

* Aproveche esta oportunidad para comprobar que el deshumidificador es naranja y no verde.

3. VERIFIQUE el deshumidificador recargable

Confirme que las perlas son de color **NARANJA**. Si las perlas son de color **VERDE**, retírelas del sistema y conéctelas a la pared a fin de recargarlas (para más instrucciones, consulte "Mantenimiento del deshumidificador recargable").

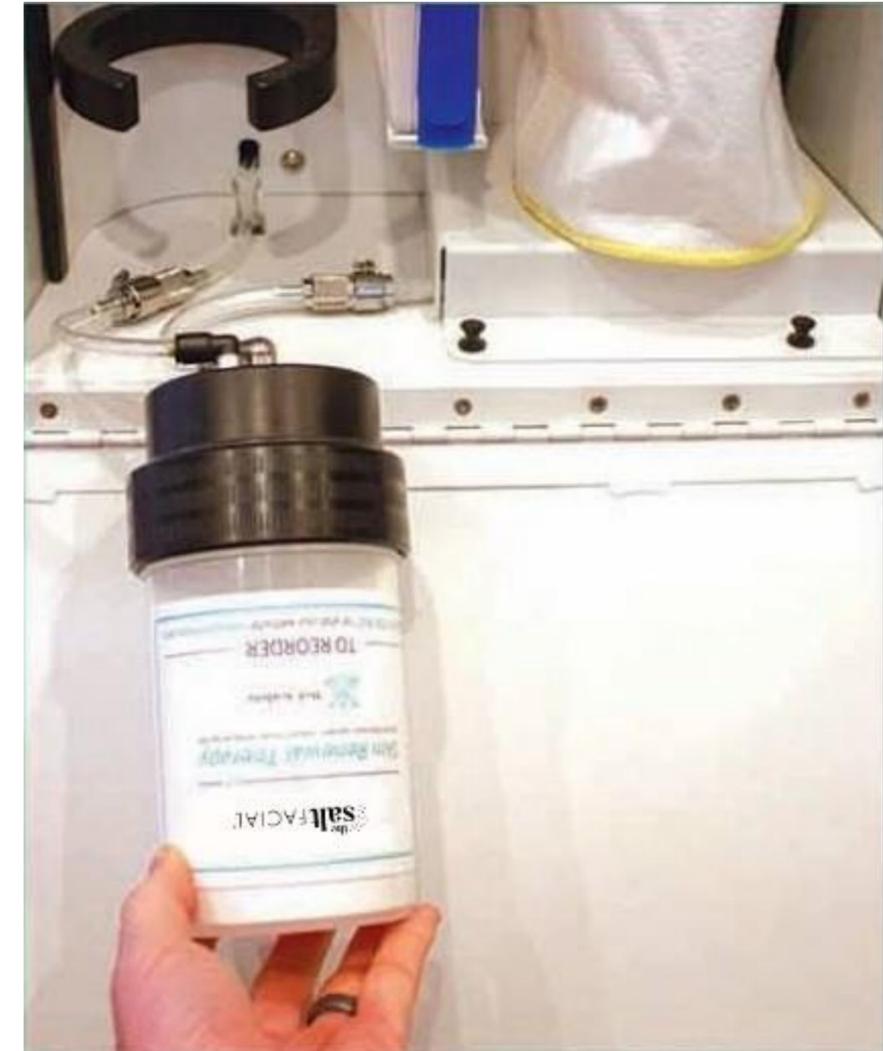

MANTENIMIENTO SEMANAL

1. LIMPIE EL INDUCTOR DE NO-VAC

RETIRE el inductor No-Vac del sistema SaltFacial®.

SUMERJA el pequeño cepillo suministrado con el Sistema SaltFacial® en alcohol y limpie las 3 aberturas.

Nota: Utilice únicamente el cepillo suministrado para limpiar el Eductor No-Vac o la pieza de mano. No utilice cepillos de botella u otros cepillos. El cepillo para botellas u otros cepillos podrían dañar el equipo.

HAGA FLUIR agua caliente durante 1 minuto por las 3 aberturas. Utilice el pequeño cepillo suministrado para limpiar las 3 aberturas.

Deje secar toda la noche. Compruebe que no queda humedad en el Eductor No-Vac antes de utilizarlo.

ANTES de volver a utilizarlo, compruebe que no queda humedad: Encienda el interruptor de palanca de exfoliación con sal y seque bien el Eductor No-Vac con aire seco del tubo de conexión de aire No-Vac antes de volver a conectarlo.

2. REEMPLACE EL DESHUMIDIFICADOR RECARGABLE

Reemplace el deshumidificador recargable solo si es necesario (es decir, si las perlas son de color VERDE).



INFORMACIÓN DE CONTACTO

CENTRO DE FORMACIÓN Y APOYO

- Visite www.TheSaltFacial.com y haga clic en **LOGIN**
- Biblioteca de formación en vídeo
- Vídeo de configuración/instalación
- Vídeo de procedimiento
- Vídeo de mantenimiento

SERVICIO TÉCNICO

- Visite www.thesaltfacial.com y haga clic en **LOGIN**
- Acceda al árbol de decisiones para la resolución de problemas

PARA EL REABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS O SOPORTE DE COMERCIALIZACIÓN

(760) 334.5267 • info@saltfacial.com

